

Notice technique

Réf. : **TB-18002-FRE**

Date de publication : 2019

Produit : INOmax DS_{IR}®, INOmax DS_{IR}® Plus

Priorité : Basse

INOmax DS_{IR}® Plus MRI, INOflo DS, Système expérimental d'administration de NO (masqué),
Système expérimental d'administration de NO pour utilisation chez l'homme uniquement,
Système expérimental d'administration de NO pour utilisation sur l'animal uniquement.

Parties concernées : Capteur d'oxygène

Classification : Information à distribuer

Objet : Modification du numéro de référence du capteur d'oxygène

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les pièces et accessoires conçues pour être utilisées avec l'INOmax DS_{IR} ou l'INOblender.

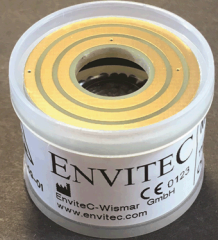
L'objectif de cette notice technique est d'aviser les cliniciens qu'un nouveau fournisseur a été choisi pour l'approvisionnement des capteurs d'oxygène des systèmes d'administration énumérés parmi les produits ci-dessus. Ce nouveau capteur sera introduit dans le cadre de l'entretien normal et de la maintenance préventive des dispositifs; aucune action n'est requise actuellement de la part des utilisateurs.

Le numéro de référence de la pièce a été modifié en raison de ce changement :

Pièce de rechange	Numéro de référence précédent	Nouveau numéro de référence
Capteur, O ₂	80043 (supprimé)	80890

Voir les instructions ci-dessous dans le cas où un client devrait remplacer un capteur.

Remarque : Le nouveau capteur d'oxygène **NE DISPOSE PAS** de bouton coupe-circuit relié au capteur de remplacement.

Nouveau capteur d'oxygène	Instructions pour la préparation et l'installation	Image du capteur
80890 (Envitec)	Après avoir retiré le capteur de son emballage, insérer le capteur, le côté portant les contacts en premier, dans le dispositif.	

Veuillez communiquer avec le responsable pour votre pays ou appeler le 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) pour obtenir une assistance technique concernant les dispositifs ci-dessus.

Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 États-Unis

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo de Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées de Mallinckrodt D'autres marques sont des marques commerciales d'une entreprise de Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs.
© 2019 Mallinckrodt



Réf. : TB-18002-FRE Date de création/mise à jour 2019
PN 21635, rév. 01