



Notice technique

Réf. : **TB-18001-FRE**

Date de publication : Février 2022

Produits : Cylindres INOMAX® / INOmeter®, cylindres INOflo®

Produits concernés : INOmax DS_{IR}®, INOmax DS_{IR}® Plus

Priorité : Basse

INOmax DS_{IR}® Plus MRI, INOvent,

DS_{IR}® Plus expérimental, INOflo DS®

Classification : Information pour distribution générale

Objet : **Ouverture de la valve du cylindre d'INOMAX pour traitement**

Le régulateur du cylindre pourrait ne pas fournir une pression et un débit de gaz adéquats si la valve du cylindre n'est pas complètement ouverte, entraînant une sous-administration ou une interruption de l'administration en raison d'une alarme de « Pression du cylindre basse » ou « Pression de NO/N₂ basse ». Une ouverture partielle de la valve du cylindre peut survenir si les utilisateurs regardent l'icône de la poignée de la valve du cylindre sur l'écran du moniteur tout en ouvrant la valve et cessent de la tourner dès que l'icône de la poignée du cylindre devient verte au lieu de continuer à ouvrir complètement la valve.

Lors de l'ouverture de la valve du cylindre pour commencer un traitement, il est très important de tourner complètement la poignée de la valve du cylindre, jusqu'à ce qu'une résistance se fasse sentir, indiquant que la valve est totalement ouverte (voir la Figure 1 ci-dessous).



CP.P.0017

Figure 1 Rotation de la poignée du cylindre dans le sens anti-horaire

Réf. : TB-18001-FRE Mise à jour 02-2022

N° réf. : 21594, rév. 02

Veillez communiquer avec le responsable pour votre pays ou appeler le 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) pour obtenir une assistance technique concernant les dispositifs ci-dessus.

Mallinckrodt Manufacturing LLC
6603 Femrite Drive,
Madison, WI 53718-6801 États-Unis

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo de Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées de Mallinckrodt. D'autres marques sont des marques commerciales d'une entreprise de Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs.
© 2022 Mallinckrodt.

Réf. : TB-18001-FRE Mise à jour 02-2022
N° réf. : 21594, rév. 02